

# LuxVisual

**Masque barrière personnalisé  
éco-responsable, lavable et réutilisable  
Made in Luxembourg**

**Certifié 20 lavages UNS1 & 50 lavages UNS2**



AFNOR SPEC S76-001 catégorie **UNS1**  
20 cycles de lavage testés par ICARE Laboratoire  
Filtration > à **99%** des microparticules de 3 µm



AFNOR SPEC S76-001 catégorie **UNS2**  
50 cycles de lavage testés par ICARE Laboratoire  
Filtration > à **89%** des microparticules de 3 µm

**ATTENTION!**

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2)

**Ce masque ne remplace pas les gestes barrières!**

(lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes)



# NOTICE D'UTILISATION



## COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

- **Lavez impérativement le masque avant la première utilisation.**

- Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
- Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
- Ne modifiez jamais le masque.

Pour le mettre :

- Tenez le masque par les lanières élastiques.
- Placez-le au niveau de votre bouche.
- Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
- Ajustez les élastiques et le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

Lorsque vous le portez :

- Évitez de le toucher et de le déplacer.
- Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

- Quand vous avez porté le masque 4h.
- Quand vous souhaitez boire ou manger.
- Quand il devient difficile de respirer.
- Si le masque s'humidifie.
- Si le masque est endommagé.
- Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
- Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
- En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
- Si le masque est déformé ou usé, jetez-le dans une poubelle qui se ferme.
- Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique

## COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

Pour le lavage :

- Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins **30 min à 60°C** minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
- Utilisez une **lingette anti-décoloration** lors du premier lavage.
- Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme.

Après le lavage :

- Faites sécher le masque dans son intégralité: les deux couches doivent être totalement sèches.
- Pour cela, faites sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
- Repassez votre masque à basse température.
- Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation).

## COMPOSITION & SÉCURITÉ

- Masque en tissu double couche auto-filtrant.
- Couche extérieure 100% PES 240g imprimée avec encres certifiées Oeko-Tex Standard 100.
- Couche intérieure 100% PES 155g Oeko-Tex Stadnadr 100.
- Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 99 % pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque après 20 lavages, et supérieure à 89% après 50 lavages.
- La résistance respiratoire et la respirabilité du masque ont été mesurées par pression différentielle à 0,4 mbar/cm<sup>2</sup> permettant son port pour une durée de 4h.

## AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce masque, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.